

3NZ TRIPLE - DETERGENTE LIQUIDO CON ENZIMAS



Disponible en forma líquida (Contenedor de un galón o contenedor de un litro).

REFERENCIAS DE FABRICA:

- 27MC 1L.....Presentación de un litro
- 27MC 1G.....Presentación de un galón

Concentrado para mayor economía.

Su característica de mayor humedecimiento, hace que penetre más fácilmente en superficies difíciles.

Remueve sangre coagulada y otros contaminantes rápidamente, únicamente sumergiendo el instrumento en la solución, reduciendo la necesidad de cepillado.

Completamente seguro para las manos – No contiene elementos cáusticos.

Tiene el mismo pH de un jabón de cara.

Limpia y remueve contaminantes, aun en aguas duras.

Anticorrosivo.

El poderoso Detergente Enzimático 3NZ Triple utilizado en el lavado de instrumental para disolver, digerir restos de material orgánico, y disminuir la carga bacteriana, contiene tres grupos de enzimas que garantizan una eliminación óptima de los contaminantes y del material desecado. El poder de las enzimas mejoradas, que trabaja en sinergia con una nueva molécula surfactante estudiada para limpieza de canales estrechos, bisagras superficies y orificios complejos. El 3NZ Triple es compatible con materiales como metal, plástico, goma o tubería corrugada.

Principales Características:

- * Seguro y fácil de usar
- * pH neutro
- * Efectivo en costo - beneficio
- * Su nueva formulación triple-enzimática actúa contra Proteínas, Grasas y Azúcares
- * Actúa bien en presencia de aguas duras
- * Contiene elementos anticorrosivos
- * Compatible con la mayoría de instrumentos
- * 100% Biodegradable
- * Acción rápida (5 minutos)
- * Contiene
 - * Dispersantes
 - * Disolventes de Sangre
 - * Disolventes de Proteínas
 - * Disolventes de Grasas
 - * Emulsificantes
 - * Agentes antiespumantes
 - * Detergentes
 - * Agentes Humectantes
 - * Agentes anticorrosión

Es muy efectivo en lavado manual, lavado con equipo ultrasónico o con lavadoras esterilizadoras.

ESTADO	LIQUIDO
COLOR	AMARILLO NEUTRO
OLOR	SUAVE Y NEUTRO
PH	NEUTRO
PUNTO DE EBULLICION	212 F
GRAVEDAD ESPECIFICA	1.0

COMPOSICION:

Citrato de Sodio :	Secuestrante, Emulsificante
Carbonato de Sodio :	Modificador de Alcalinidad
Alkyl Iminopropionato :	Surfactante Anfótero, Hidrotropo, Antiespumante, Compatibilidad con Aguas Duras, Ayuda de Enjuague, Buena Detergencia, Mejorador de Cavitación, Funciona Sinérgicamente.

Alkyl Polyglycosido	Excelente humectante, limpiador, detergente, ayuda a un enjuague rápido sin manchas, hidrotropo, sinergista, dispersante, aceptado por la U.S.D.A. bajo el nombre comercial de Glucopon.
Metil y Propil	Preservativos
Mezcla Parabenica (4:1) Limón	Fragancia
Amarillo DC	Colorante
Enzima Proteasa	Desdobla Proteínas, Sangre, Materia Fecal y Moco.
Enzima Lipasa	Desdobla Grasas, Moco y Material Fecal.
Enzima Amilasa	Desdobla Azucres
Ácido Bórico	Buffer, Estabilizador de Enzimas.

DIRECCIONES DE USO

1. Mezcle una onza por galón de agua para lavado manual.
2. Sumerja el equipo y los instrumentos cuidadosamente.
3. Remoje el equipo y los instrumentos por 5 minutos o menos
4. Agite el equipo y los instrumentos delicadamente
5. Retire el equipo y los instrumentos cuidadosamente
6. Enjuague profundamente con agua caliente.

NOTA: Para lavado con maquina ultrasónica o lavadora mecánica, mezcle una onza por galón de agua tibia, o use la dilución mostrada en la siguiente tabla:

USO	CONCENTRACION	EQUIVALENTE
Lavado Manual	1 Onza/Galon	7,5 ml/lit o 30 ml/Gal
Reprocesadoras de Endoscopia	1/2 Onza/Galon	3.75 ml/lit o 15 ml/Gal
Unidades Ultrasonicas	1 Onza/Galon	7,5 ml/lit o 30 ml/Gal
Lavadoras Desinfectadoras	2 tasas/carga	473 ml/Carga
Descontaminadores	2 tasas/carga	473 ml/Carga

PRECAUCION

Mantenga el contenedor cerrado, y fuera del alcance de los niños.

Contacto con Ojos: Lave con cantidades copiosas de agua por un tiempo mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Ingerido: Suministre cantidades importantes de agua. No induzca el vómito. Consulte con un médico.

MANEJO ADECUADO DE LOS INSTRUMENTOS

Separe las partes cortopunzantes del resto, antes de la limpieza.

Sumerja el equipo en la solución triple-enzimática una vez que han sido contaminados, para evitar desecado del material contaminante.

Use un cepillo para remover los elementos desecados de difícil remoción.

Enjuague el equipo y los instrumentos profundamente con agua caliente.